



کیت آزمایش ادرار خانگی - فوری

معرفی محصول

یکی از پایه ایی ترین آزمایش ها که حال واقعی بدن افراد را از درون گزارش می کند، آزمایش ادرار می باشد، لذا برای مراجعه به پزشک تغذیه، داخلی و... با داشتن این آزمایش به پزشک کمک می کنید که اطلاعات بیشتری از خود برای تجویز دارو داشته باشد. همچنین یکی از شایع ترین بیماری ها بیماری کلیه می باشد که با آزمایش به موقع با استفاده از این کیت به راحتی می توان از لطمات جدی به کلیه جلوگیری کرد. زنان باردار که برای آزمایش، رفتن به آزمایشگاه برای آنها دشوار می باشد این کیت بسیار به آن نیز کمک می کند.

گواهی ها

- تاییده بالینی از آزمایشگاه و درمانگاه شهید شوریده

مشتریان اصلی

- کلیه افراد بالای 7 سال
- آزمایشگاه ها خصوصی و دولتی
- خانه های بهداشت
- شرکت های پرستاری و خدمات در منزل
- بیمارستان های خصوصی دولتی
- آزمایشگاه ها خصوصی و دولتی



نام محصول: کیت تست ادرار خانگی
شیوه دستیابی به محصول: تحقیق و توسعه

مزایای محصول



- انجام آزمایش در منزل بدون نیاز مراجعه به آزمایشگاه
- مقایسه فوری و برخط نتایج آزمایش فعلی با گذشته و مشاهده روند تغییرات نتایج
- امکان ارسال نتایج به صورت PDF برای پزشک
- به پیشگیری از بیماری برای افراد کمک شایانی می کند.

کاربردهای محصول



- ارزیابی 11 پارمتر حیاتی بدن به صورت فوری در منزل
- تسهیل شرایط آزمایش برای افراد مسن
- تسهیل شرایط آزمایش برای بانوان باردار
- تسهیل شرایط آزمایش برای افراد به دلیل عدم نیاز مراجعه به آزمایشگاه
- پایش سلامتی افراد
- امکان پیشگیری از بسیاری از بیماری ها به دلیل ارزیابی 11 پارمتر حیاتی بدن

استارتاپ دانش بنیان Mylab724 ، بنا دارد به وسیله هوش مصنوعی عصر نوینی در زمینه صنعت تشخیص های آزمایشگاهی سراسر کشور ایجاد نماید.



051-37679194



www.mylab724.com



@mylab724



دفتر مرکزی : خراسان رضوی - مشهد
بلوار خیام - ساختمان پست بانک
پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات - طبقه 6



مراحل استفاده از اپلیکیشن، کیت تست ادرار مای لب 724


1. ابتدا بیمار ظرف ادرار را پر می کند.



2. نوار موجود در کیت مای لب را
داخل ظرف ادرار قرار می دهد.



3. طبق دستورالعملی که داخل کیت قرار داده
شده، نوار آغشته به ادرار را روی چارت رنگی که
داخل کیت مای لب موجود است، قرار می دهد.

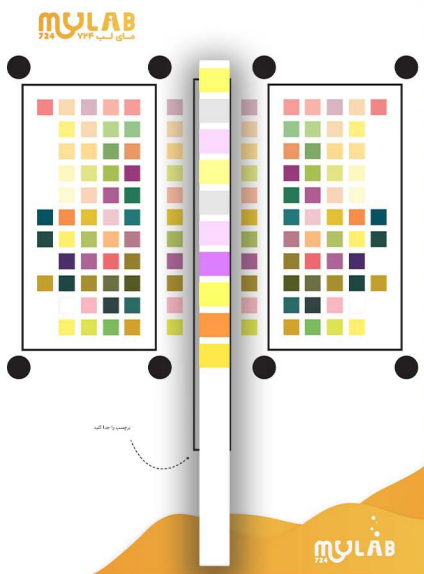


چارت رنگی داخل کیت

نوار رنگی داخل کیت را روی چارت قرار می دهیم



4. در همین حالت از نور رنگی توسط اپلیکیشن
مای لب 724 که روی تلفن همراه نصب کردیم
عکس می گیریم.

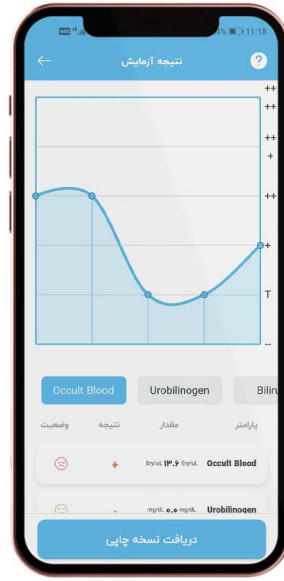

5. بعد از عکس گرفتن ، اطلاعات توسط
اپلیکیشن به سرور ارسال می شود و بعد
از چند دقیقه آنالیز نتایج برای مخاطب
ارسال می شود.

6. اطلاعات به صورت فایل pdf و همچنین نمودار داخل اپلیکیشن
بایگانی می شوند و مخاطب می تواند همیشه به آن ها دسترسی داشته باشد.



نمونہ خروجے



جنسیت : مرد

شمارہ کاربری : ۰۹۳۹۳۱۱۲۱۵۰۵

سن : ۳۲

نام : علی طباطبایی

تاریخ آزمایش : ۱۴۰۱/۱/۲۷

Urine Analysis

S.NO	TEST ITEM	VALUE	RESULT	TEST RESULT	UNIT	FLAG	REF.RANGE
۱	Occult_Blood	۷.۰	TRACE	Trace	Ery/ul	عادی	<۱۰
۲	Urobilinogen	۰.۰	NEGATIVE	-	mg/dl	عادی	<۲.۰
۳	Bilirubin	۰.۰	NEGATIVE	-	mg/dl	عادی	<۱.۰
۴	Protein	۷.۵	NEGATIVE	-	mg/dl	عادی	<۳۰
۵	Nitrite	۰.۰۸	NEGATIVE	-	mg/dl	عادی	<=۰.۶
۶	Ketone	۰.۰	NEGATIVE	-	mg/dl	عادی	<۲۵
۷	Ascorbic Acid	۹.۰	TRACE	Trace	mg/dl	عادی	<۱۰
۸	Glucose	۰.۰	NEGATIVE	-	mg/dl	عادی	<=۵
۹	PH	۵.۳		۵.۳			
۱۰	Density	۱.۰۳		۱.۰۳			
۱۱	Leukocytes	۰.۰	NEGATIVE	-	Leu/ul	عادی	<۲۵

Trace : Please next two weeks test again.